

Brugsanvisning – C-Blade Gutta Cutter

Advarsler

- Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, inden du bruger dette udstyr. Det vil vejlede dig i korrekt anvendelse.
- Læs manualen omhyggeligt, inden du bruger udstyret.
- Brug kun enheden i henhold til det tiltænkte formål. Producenten påtager sig intet ansvar, hvis brugeren ikke følger instruktionerne eller anvender udstyret til andre formål.
- Ved brug af ekstern strømforsyning skal du sikre dig, at spændingen ligger inden for det interval, der er angivet på enheden, for at undgå skader på operatør eller patient.
- Undgå at røre patientens læber, tandkød eller slimhinder, da dette kan forårsage forbrændinger på både operatør og patient. Enheden skal anvendes uden for patientens mund.
- Den opvarmede kanyle må ikke komme i kontakt med brændbare gasser eller væsker, da dette kan medføre brandfare.
- Udstyret må ikke anvendes i omgivelser, hvor der forekommer brændbare gasser.
- Enheden må ikke nedsænkes i væske.
- Hvis der forekommer væskelækage fra udstyret, skal brugen straks ophøre, og producenten eller autoriseret forhandler kontaktes.
- Personer med hjertesygdomme, gravide kvinder samt børn bør anvende enheden med forsigtighed.
- Dette udstyr er kun beregnet til professionel brug.

Standardlevering

- Gutta cutter håndtag: 1 stk.
- Opladerbase: 1 stk.
- Pen-spids (4 stk.): 1 pakke

Produktbeskrivelse og anvendelse

- Dette produkt er kun beregnet til veluddannede tandlæger og dentallaboratorier.
- Det bruges i forbindelse med kirurgiske indgreb og rodfyldning, hvor det hjælper med at skære og fjerne overskydende guttaperka i rodkanaler.

Tekniske specifikationer

- Strømforsyning: Genopladeligt batteri via opladerbase
- Spænding: Som angivet på enheden
- Pen-spids: Udskiftelige, varmeledende metaltips

- Brugstid pr. opladning: Afhænger af arbejdsforhold
- Opladning: Enheden placeres i opladerbasen

Betjening

- Sørg for, at enheden er fuldt opladet inden brug.
- Monter den ønskede pen-spids korrekt i håndtaget.
- Tænd enheden i henhold til betjeningsknapperne.
- Vent til spidsen er tilstrækkeligt opvarmet.
- Brug spidsen til at skære guttaperka under rodfyldning.
- Sluk enheden efter brug, og placer den i opladerbasen.

Vedligeholdelse og rengøring

- Afbryd altid strømforsyningen før rengøring.
- Brug aldrig opløsningsmidler eller ætsende væsker.
- Tør enheden af med en blød, tør eller let fugtig klud.
- Spidser kan steriliseres i henhold til producentens anvisninger.
- Selve håndtaget må ikke steriliseres i autoklave.

Fejlfinding

- Enheden tænder ikke: Kontroller batteri og opladerforbindelse.
- Utilstrækkelig varme: Sørg for korrekt montering af spidsen; kontroller om batteriet er opladet.
- Væskelækage eller skader: Stop brugen straks og kontakt producenten eller forhandleren.

Sikkerhedsmæssige forholdsregler

- Brug aldrig enheden på patienter udenfor det tiltænkte område.
- Undgå kontakt mellem den varme spids og blødt væv.
- Kontroller altid, at spidsen er intakt og korrekt monteret, inden du arbejder.
- Opbevar enheden uden for børns rækkevidde.

Garanti og service

- Enheden leveres med standardgaranti fra producenten.
- Ved problemer eller defekter kontaktes autoriseret forhandler eller producent.
- Brug af uoriginale reservedele eller spidser kan medføre bortfald af garanti.

