

Bruksanvisning – C-Blade Gutta Cutter

Advarsler

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar utstyret i bruk. Den vil veilede deg til korrekt bruk.
- Les manualen nøye før du bruker utstyret.
- Bruk enheten kun i henhold til det tiltenkte formålet. Produsenten tar ikke ansvar dersom brukeren ikke følger instruksjonene eller bruker utstyret til andre formål.
- Ved bruk av ekstern strømkilde må du sørge for at spenningen ligger innenfor det intervallet som er angitt på enheten, for å unngå skader på operatør eller pasient.
- Unngå kontakt med pasientens lepper, tannkjøtt eller slimhinner, da dette kan forårsake brannskader på både operatør og pasient. Enheten skal brukes utenfor pasientens munn.
- Den oppvarmede spissen må ikke komme i kontakt med brennbare gasser eller væsker, da dette kan medføre brannfare.
- Utstyret må ikke brukes i miljøer hvor det finnes brennbar gass.
- Enheten må ikke senkes ned i væske.
- Hvis det oppstår væskelekkasje fra utstyret, skal bruken straks opphøre, og produsent eller autorisert forhandler kontaktes.
- Personer med hjertesykdom, gravide kvinner og barn bør bruke utstyret med forsiktighet.
- Dette utstyret er kun beregnet til profesjonell bruk.

Standardlevering

- Gutta cutter-håndtak: 1 stk.
- Ladebase: 1 stk.
- Penne-spisser (4 stk.): 1 pakke

Produktbeskrivelse og bruk

- Dette produktet er kun beregnet for velutdannede tannleger og tanntekniske laboratorier.
- Det brukes i forbindelse med kirurgiske inngrep og rotfylling, der det hjelper med å skjære og fjerne overskytende guttaperka i rotkanaler.

Tekniske spesifikasjoner

- Strømkilde: Oppladbart batteri via ladebase
- Spenning: Som angitt på enheten
- Penne-spisser: Utskiftbare, varmeledende metallspisser

- Brukstilid pr. opplading: Avhengig av arbeidsforhold
- Lading: Enheten plasseres i ladebasen

Bruk

- Sørg for at enheten er fulladet før bruk.
- Monter ønsket pennespiss korrekt i håndtaket.
- Slå på enheten i henhold til betjeningsknappene.
- Vent til spissen er tilstrekkelig oppvarmet.
- Bruk spissen til å skjære guttaperka under rotfylling.
- Slå av enheten etter bruk, og sett den i ladebasen.

Vedlikehold og rengjøring

- Koble alltid fra strømforsyningen før rengjøring.
- Bruk aldri løsemidler eller etsende væsker.
- Tørk av enheten med en myk, tørr eller lett fuktig klut.
- Spissene kan steriliseres i henhold til produsentens anvisninger.
- Selve håndtaket må ikke steriliseres i autoklav.

Feilsøking

- Enheten slår seg ikke på: Kontroller batteri og ladeforbindelse.
- Utilstrekkelig varme: Kontroller at spissen er riktig montert; sjekk om batteriet er ladet.
- Væskelekkasje eller skade: Avbryt bruken umiddelbart og kontakt produsent eller forhandler.

Sikkerhetsforholdsregler

- Bruk aldri enheten på pasienter utenfor det tiltenkte bruksområdet.
- Unngå kontakt mellom den varme spissen og bløtvev.
- Kontroller alltid at spissen er intakt og riktig montert før bruk.
- Oppbevar enheten utenfor barns rekkevidde.

Garanti og service

- Enheten leveres med standard garanti fra produsenten.
- Ved problemer eller feil kontaktes autorisert forhandler eller produsent.
- Bruk av uoriginale reservedeler eller spisser kan føre til bortfall av garanti.

